

CalfVital – Der Kälberretter

Die ersten Sekunden kurz nach der Geburt sind oft entscheidend über Leben und Tod des neugeborenen Kalbes. Besonders bei Schweregeburten gelangt häufig Schleim in die Luftröhre und Lunge.

Dann heißt es: Schnell reagieren!

Oft wird das Kalb von zwei Personen an den Hinterbeinen hochgehoben oder gar über ein Gitter gehängt, um den Schleim aus der Luftröhre fließen zu lassen.



Eine deutlich effektivere und zugleich sanftere Alternative bietet das Absaugen des Schleims mit dem neuen **CalfVital Kälberretter**. Er besteht aus einem Saugkolben, der einfach von Hand bedient wird. Ein handlicher Mundtrichter wird übers Maul des Kalbes geschoben. Einfache Kolbenhübe saugen dann den Schleim sehr effektiv aus den Atemwegen.


Wenn das Kalb danach keine Atmung zeigt, kann es notwendig sein es zu reanimieren. Hier hilft der **CalfVital Kälberretter** dem Geburtshelfer mit einem zweiten Aufsatz, das Kalb effektiv zu beatmen. Ein integriertes Ventil sorgt dafür, dass kein zu hoher Druck aufgebaut wird. Das schont besonders die empfindlichen Lungenbläschen.

Der einfache Aufbau und das hochwertige Kunststoffmaterial erlauben eine einfache Reinigung und Desinfektion des **CalfVital Kälberretters**. Zudem sorgt die Aufbewahrung in einer praktischen Box dafür, dass die Pumpe immer sauber zum nächsten Einsatz parat steht. So ist die Pumpe eine sinnvolle und notwendige Hilfe für jeden Milchviehbetrieb.




- *Reduzieren Sie Ihre frühen Kälberverluste!*
- *Einfache Handhabung – schnelle Reinigung!*
- *Langlebigkeit durch hochwertige Materialien!*
- *2 Jahre Garantie!*
- **Preis: 105 € / CalfVital Kälberretter**
plus Frachtanteil und 19 % MwSt
- *So macht sich der CalfVital Kälberretter bereits beim ersten reanimierten Kalb bezahlt!*

Schleim absaugen

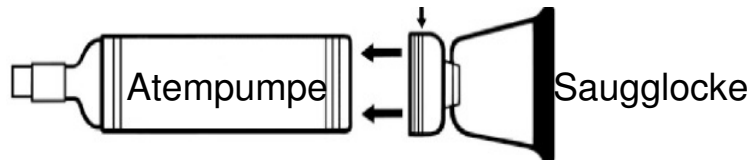


Zum Schleimabsaugen bitte die gelbe Saugglocke auf das flache Ende der Atempumpe stülpen.

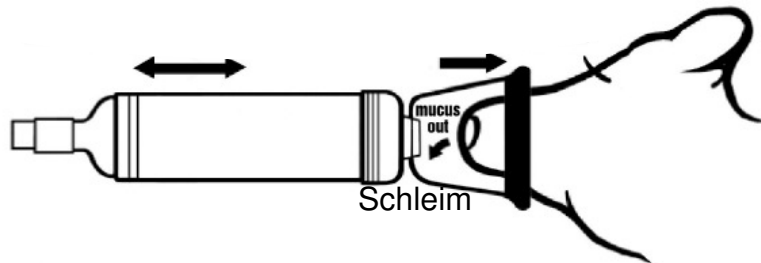


Kopf und Nase des Kalbes soweit in die Saugglocke stecken, dass keine Luft von außen mehr einströmen kann.

Beatmen

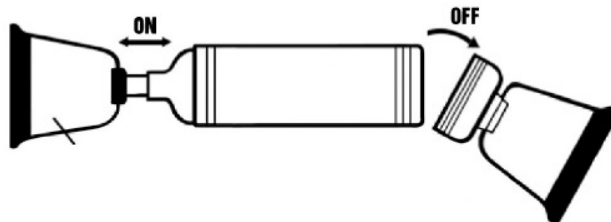

Zum Beatmen die gelbe Saugglocke abnehmen und die Atemmaske auf das spitze Ende der Atempumpe setzen

Der Kopf und die Nase des Kalbes sollten so weit wie möglich in der Atemmaske stecken, dass keine Luft von außen einströmen kann.

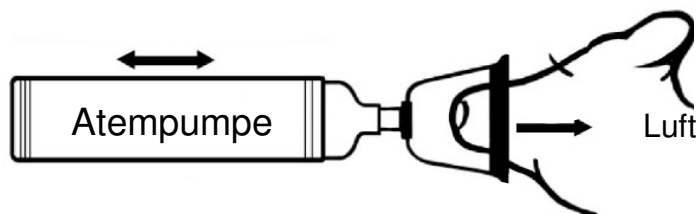

Zum Beatmen gleichmäßig alle 5-10 Sekunden einmal pumpen bis das Kalb selbständig atmet.